

INFORMACION DEL PRODUCTO

Leer las instrucciones de uso antes de su manipulación. Media mascarilla filtrante que previene contra el riesgo de inhalación de partículas catalogada como EPI (Equipos de protección individual), con equivalencia **FFP2 NR Clase III** según el reglamento UE 2016/425. Esta mascarilla cumple con los requisitos de la norma UNE: 149:2001 + A1 2010. Se trata de un producto no reutilizable **NR**.

COMPOSICION:

El EPI se fabrica en un material no tejido con:

Bandas de Ajuste: Elastano y Poliamida.

Clip nasal: Acero galvanizado y polipropileno

Filtro: Polipropileno hidrófobo.

5 Capas **Spunbond / Meltblown / Hot Air Cotton / Meltblown / Spunbond**.

ADVERTENCIAS:

Manipular con las manos limpias.

Ajuste de media mascarilla filtrante (verificar antes de usar)

En caso de vello facial o utilización de gafas, la protección del EPI podría verse disminuída.

Mascarilla no válida en condiciones de baja calidad del aire (Contaminantes, deficiencia de oxígeno).

Mascarilla no válida en atmósferas explosivas.

Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.

El usuario debe conocer el uso y manejo de la mascarilla.

No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Este producto es desechable y solo debe usarse una vez. No reutilizar, por favor desechar responsablemente.

Tras 8 horas de uso, reemplazar por otra nueva

Si esta deteriorada, reemplazarla por otra aunque no se haya utilizado nunca.

La mascarilla auto filtrante tiene una caducidad limitada (vease embalaje).


Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.

Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

ALMACENAMIENTO:

Cada Unidad de mascarilla filtrante FFP2 fabricada por Siempre Perfecta SL se distribuye en un bolsa de plástico. Para su adecuado almacenamiento, antes de su uso, se deben guardar las siguientes condiciones mencionadas a continuación:

- Guardar en un espacio interior bien ventilado.
- La humedad debe ser inferior al 80% y sin gases corrosivos.
- Temperatura óptima de almacenamiento dentro del rango -30 a 40° C. Evitar fuentes de calor

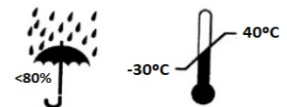

En estas condiciones, la mascarilla tiene una **caducidad de tres años**.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REVISION Y DESINFECCION

La mascarilla FFP2 **no es reutilizable (NR)**, después de cada uso se debe retirar según las instrucciones de retirada de la mascarilla.

Por este motivo **NO debe limpiarse**. Tras ocho horas de uso, reemplazarla por otra nueva.