



Instrucciones de Uso

- Instructions for Use
- Instructions de Fonctionnement
- Instruções para Uso
- Bedienungsanleitung
- Istruzioni per l'uso

Lávese las manos antes de manipularla


Wash your hands before handling
 Lavez-vous les mains avant de manipuler
 Lave as mãos antes de manusear
 Waschen Sie Ihre Hände vor der Handhabung
 Lavarsi le mani prima di maneggiarle



1

Toque solo las gomas de la mascarilla

Only touch the elastic bands of the mask
 Ne touchez que les élastiques du masque
 Toque apenas os elásticos da máscara
 Berühren Sie nur die Gummibänder der Maske
 Toccare solo gli elastici della maschera

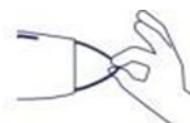

2

Coloque las gomas por detrás de las orejas

Place the rubber bands behind your ears
 Placez les élastiques derrière les oreilles
 Coloque os elásticos atrás das orelhas
 Legen Sie die Gummibänder hinter die Ohren
 Posizionare gli elastici dietro le orecchie



3

Ajuste la pinza nasal a la nariz

Fit the nose clip to your nose
 Ajuster le pince-nez au nez
 Ajuste o clipe de nariz no nariz
 Befestigen Sie den Nasenclip an der Nase
 Attaccare la clip per naso al naso



4

Asegúrese de que no quedan espacios entre su cara y la mascarilla

Make sure there are no gaps between your face and the mask
 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre votre visage et le masque
 Certifique-se de que não haja espaços entre o seu rosto e a máscara
 Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihrem Gesicht und der Maske keine Lücken bestehen
 Assicurati che non ci siano spazi tra il tuo viso e la maschera



5

Retírela tocando solo las gomas

Remove it by touching only the rubbers
 Retirez-le en touchant uniquement les caoutchoucs
 Remova-o tocando apenas nas borrachas
 Entfernen Sie es, indem Sie nur die Gummis berühren
 Rimuoverlo toccando solo le gomme



6

Deséchela en una bolsa de basura cerrada y lávese las manos

Dispose of it in a closed garbage bag and wash your hands
 Jeter dans un sac poubelle fermé et se laver les mains
 Descarte em um saco de lixo fechado e lave as mãos
 In einem geschlossenen Müllsack entsorgen und Hände waschen
 Gettalo in un sacco della spazzatura chiuso e lavati le mani



7


ADVERTENCIA: SOLO UN USO, TIEMPO MAXIMO DE UTILIZACION 8 HORAS



Vease información suministrada por el fabricante



Humedad para el almacenamiento (RH) <80%

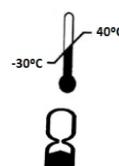

Datos temperatura (°C)



Año y mes de caducidad